

AVVERTENZE

(da leggere attentamente)

1 - Il test rapido **DrugWipe 5S**, quando eseguito da un privato, **non ha valore legale**. Questo significa che, sebbene possa fornire un'indicazione preliminare sulla presenza di sostanze stupefacenti, il risultato ottenuto **non può essere utilizzato come prova ufficiale** in ambito legale. Solo i risultati derivanti da test eseguiti dalle forze di polizia o da laboratori ufficiali hanno valore legale e possono essere utilizzati in procedimenti giuridici.

Pertanto, se un privato esegue il test autonomamente, il risultato è puramente informativo e non può essere considerato definitivo o valido in contesti legali.

2 - Per evitare falsi positivi o falsi negativi è necessario seguire attentamente le istruzioni d' uso del test DrugWipe 5S fornite. Il produttore e il fornitore declinano ogni responsabilità sull' errato utilizzo dei test.

3 - Il test rapido DrugWipe ha il codice di smaltimento 18 01 03 EWC (*European Waste Catalogue*) che attesta la possibilità di essere smaltito come rifiuto normale poiché non sono presenti sostanze nocive, tossiche o rischiose per l'ambiente all'interno del prodotto.

Il DrugWipe è realizzato in Germania e rispetta tutte le direttive europee, ad esempio il database REACH.

Per il riciclaggio:

- La busta argentata e il cappuccio di protezione (grigio) del DrugWipe possono essere riciclati nei rifiuti dedicati alla plastica.

- Il test DrugWipe sia quando è stato utilizzato sia quando è scaduto deve essere smaltito nei rifiuti indifferenziati poiché non è pura plastica.

ISTRUZIONI D' USO DRUGWIPE 5S:

Scopo previsto

DrugWipe 5 S è stato progettato come ausilio per il rilevamento qualitativo di droghe nella saliva umana da parte di professionisti addestrati.

Il test rileva cannabis, oppiacei, cocaina e anfetamine/ metanfetamine (compresi MDMA/ecstasy). La procedura di misurazione fornisce un risultato preliminare (procedura di screening). È necessario procedere alla verifica dei risultati, in particolare se positivi. I metodi ad ampio spettro da preferire sono la cromatografia a liquido o a gas unita alla spettrometria di massa (LC/MS, GC/MS).

Principio del test

DrugWipe 5 S è un test di screening immunologico rapido. Il portacampione trasferisce il campione sulle strisce del test, che contengono anticorpi specifici per droga. Se il campione contiene droghe, queste si legano agli anticorpi.

Il test ha inizio non appena si spezza il vetro integrato e viene rilasciato il liquido. Grazie all'ausilio del liquido, le droghe illegali legate agli anticorpi migrano sulla linea del test. La linea del test rossa viene valutata visivamente.

Contenuto della confezione


1 test della saliva DrugWipe 5 S

1 confezione con essiccante

Leggere prima di eseguire il test

1. DrugWipe 5 S è monouso.
2. Eliminare il test se ha superato la data di scadenza.
3. Evitare temperature superiori ai +50 °C. Il test potrebbe risultarne danneggiato.
4. Eliminare il test se la confezione è danneggiata, se contiene tracce di umidità o se una linea di controllo sembra essere già diventata rossa.
5. Aprire la confezione appena prima di utilizzare il test.
6. La saliva è potenzialmente infettiva. Si consiglia di indossare guanti monouso per evitare il contatto con la saliva.

Esecuzione del test

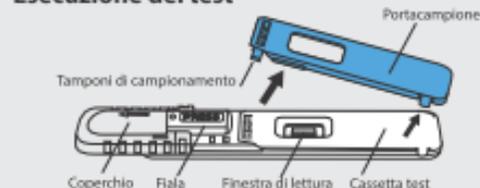

1. Far scorrere il coperchio nella direzione della freccia fino a quando si legge tutta la parola PRESS (premere).




2. Rimuovere il portacampione blu dalla cassetta test bianca. **Non toccare i tamponi per campioni.**




3. Chiedere alla persona sottoposta al test di passarsi la lingua sulla parte interna della bocca in senso circolare per tre volte. Utilizzare quindi il portacampione per raccogliere un po' di saliva dalla lingua o dall'interno della guancia.

Se il colore dei tamponi per campioni passa da rosso a giallo significa che il campione è stato raccolto correttamente.

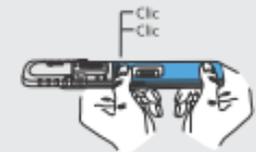

4. Collocare di nuovo il portacampione sulla cassetta test. **Il portacampione deve inserirsi in posizione con un doppio clic udibile.**

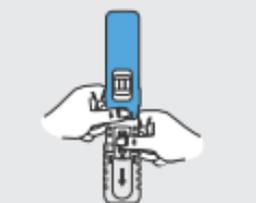

5. Tenere la cassetta test in senso verticale con la fiala in basso. **Collocare in orizzontale il proprio pollice al centro della parola PRESS e premere forte in una sola volta fino a rompere la fiala.** Continuare a **tenere la cassetta per altri 10 secondi come mostrato in figura.**




6. Lasciar riposare il test su una superficie orizzontale. Dopo 5 minuti, leggere il risultato.

Interpretazione dei risultati

- In caso di campioni fortemente positivi, è possibile vedere un risultato già dopo 3 minuti.
- È possibile leggere il risultato dopo 5 minuti.
- Il risultato rimane valido anche 10 minuti dopo la conclusione del test.
- Il risultato del test deve essere interpretato in modo positivo anche se le linee del test subiscono una variazione di colore leggera o incompleta.
- Accertarsi che l'illuminazione sia sufficiente nell'ambiente in cui si valutano i risultati del test; se necessario, utilizzare una torcia.


La finestra di lettura mostra 1 o 2 gruppi di droghe e una linea di controllo per ciascuna striscia di test. Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CA	Cannabis (THC/Marijuana/Hashish)
AM	Anfetamine
MET	Metanfetamine (MDMA/Ecstasy)
CO	Cocaina (Crack)
OP	Opiacei (Eroina/Morfina)
CL	Linea di controllo

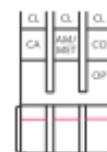


Risultato negativo = nessuna droga assunta

Perché il test possa considerarsi valido, tutte le linee di controllo devono diventare rosse. Il test è negativo per le droghe per cui nessuna linea del test diventa rossa.

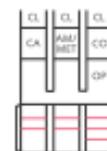

Risultato positivo = assunzione di droga

Perché il test possa considerarsi valido, tutte le linee di controllo devono diventare rosse. Il test è positivo per le droghe la cui linea del test diventa rossa.

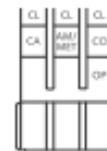

Risultato non valido

Il test non è valido se almeno una linea di controllo non diventa rossa. Ripetere l'esame con un nuovo test DrugWipe 5 S.